


## Fiche technique



### Informations

Désignation	Siège de douche escamotable, 360 x 580 x 550 mm, Assise Polypropylène Taupe & Pieds Aluminium Epoxy Gris, Ø 25 mm, Haut. 550 mm
Référence	047625
<b>Les plus produit</b>	<b>Avec béquille automatique.</b>

### Description

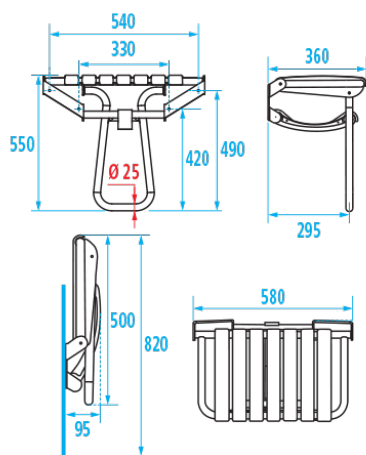

Assise grande taille. 7 lattes polypropylène taupe.  
Tube aluminium époxy gris.  
Permet de prendre une douche en position assise sous la douche.

Hauteur spécifique 550 mm, réservée à l'usage particulier.  
Norme pour la collectivité : 500 mm.

### Caractéristiques techniques

Diamètre Ø	25 mm
Finition	Epoxy
Matière	Polypropylène & Aluminium
Couleur	Taupe & Gris
Dimensions	360 x 580 x 550 mm
Conditionnement	Boîte carton
Tests laboratoire à	200 kg
Charge admissible	150 kg
Garantie	5 ans
Gencod	3563390476253
Code douanier	761519
Notice	Aucune notice disponible
Pièces détachées	Réf. 047628 : Latte assise taupe. Réf. 047644 : Tampon pour pied siege de douche. Réf. 047623 : Latte de rappel.

## Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm).

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés.

Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège.

Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui.

Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles.

Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

## Confort d'usage

### Fonction

Repos



### Caractéristiques

Horizontal



Vertical



Oblique



Anticorrosion



### Type d'utilisation

Bain



Douche



WC



Lavabo



Vestiaire/Cabine



### Lieux d'utilisation

Ets médicaux



Habitats privés



Lieux de travail

